

Cavigliera AIRFORM® - Cod. 0618

E' un dispositivo medico C E

Indicazioni

Distorsioni di caviglia gravi o di media gravità

Controindicazioni

Traumi gravi per cui occorre un trattamento ortopedico o chirurgico

Caratteristiche

Stabilizzazione laterale dell'articolazione della caviglia.

Composizione

Scocca: polipropilene + elastomero

Cinghie: poliammide

Inserto gonfiabile: polipropilene/vinile

Corrispondenza Taglie

Taglia
Taglia unica

L'ortesi può essere utilizzata sia per la caviglia destra sia per la caviglia sinistra. Essendo simmetriche, ciascuna delle valve si adatta sia al malleolo interno che a quello esterno

Posizionamento

Regolare la distanza tra le due valve, a livello del tallone, agendo sui tiranti laterali della talloniera. Applicare la valve ad entrambi i lati della caviglia in modo da coprire i malleoli. Applicare e stringere la cinghia inferiore. Infilare il piede che indossa l'ortesi in una calzatura spaziosa e stabile (la scarpa deve essere regolabile con i lacci o con chiusura autoadesiva). Regolare la chiusura della scarpa. Applicare la cinghia superiore. Dopo qualche giorno di utilizzo, le cinghie possono allentarsi, in questo caso stringere di nuovo adeguatamente. Se compare un disturbo localizzato allentare le cinghie e riposizionare le valve. I cuscinetti ad aria sono già pressurizzati in modo tale da non richiedere ulteriori regolazioni. Tuttavia il tubicino in dotazione consente di gonfiarli o sgonfiarli in caso di necessità.

Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:

- pulire le parti in plastica con un panno umido
- le protezioni laterali removibili possono essere lavate a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri
- sciacquare accuratamente
- non strizzare
- lasciare asciugare orizzontalmente
- non stirare