

## Cavigliera graduale - Cod. 0614

E' un dispositivo medico C €

### Indicazioni

Distorsione del compartimento esterno

Postumi di distorsione

Lassità legamentaria cronica

Stabilizzazione e protezione durante l'attività sportiva

### Controindicazioni

Fase di tumefazione ed ematoma nella distorsione di media gravità che necessita il posizionamento di una doccia posteriore gessata, escludendo l'appoggio del piede sino alla scomparsa dei sintomi.

Distorsione grave della caviglia.

### Caratteristiche

Realizzata in tessuto con forte grado di contenzione, questa cavigliera a tallone bloccato contiene un dispositivo antiurto di protezione dei malleoli.

Dotata di una doppia benda di stabilizzazione con una protezione nella sua parte mediana, al fine di assorbire eventuali colpi al piede.

La regolazione è facilitata dalla chiusura autoadesiva tramite la benda superiore.

La cavigliera può essere indossata anche senza benda di stabilizzazione.

### Composizione tessile

78% poliammide

22% fibra di gomma

### Corrispondenza taglie

Circonferenza caviglia misurata sui malleoli in cm	Taglia	Altezza dal tallone in cm
da 20 a 22	1	11
da 22 a 24	2	11
da 24 a 26	3	11
da 26 a 28	4	11
da 28 a 30	5	11

### Posizionamento

Senza benda di stabilizzazione:

- Calzare la cavigliera ed adattare la chiusura a strappo.

Con benda di stabilizzazione:

- Indossare la cavigliera, fissare la benda stabilizzatrice sull'apposita fettuccia e tenerla in tensione.
- Avvolgere la benda facendola passare da dietro e posizionando l'asola attorno al tallone. Tenere la benda in tensione.
- Continuare ad avvolgere facendo passare la benda sul collo del piede tenendola in tensione.

- Far passare un'altra volta la benda attorno al tallone avvolgendolo con l'asola.
- Fissare la chiusura a strappo sull'apposito tassello.

**Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:**

- lavare a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri
- sciacquare accuratamente
- non strizzare
- lasciare asciugare orizzontalmente
- non stirare