

Cavigliera Legamenti

E' un dispositivo medico C€

Indicazioni

Distorsione lieve del compartimento esterno

Distorsione del compartimento esterno di media gravità dopo la fase edematosa

Fase di riabilitazione sportiva post-operatoria

Controindicazioni

Fase di tumefazione ed ematoma nella distorsione di media gravità che necessita il posizionamento di una doccia posteriore gessata, escludendo l'appoggio del piede sino alla scomparsa dei sintomi.

Distorsione grave della caviglia

Caratteristiche

Cavigliera a tallone aperto realizzato con tessuto ad alta contenzione.

Il richiamo dinamico esterno rappresenta l'originalità di questa cavigliera: per il suo effetto di eversione dell'avampiede riduce la tensione del legamento laterale esterno leso nella distorsione lieve e di media gravità, permettendone la cicatrizzazione.

Composizione Tessile Calzino

47% poliammide

31% fibra di gomma

17% cellulosa

5% elasthan

Composizione Tessile Richiamo Dinamico

50% poliestere

31% fibra di gomma

19% poliammide

Corrispondenza Taglie

| Circonferenza sopra la caviglia in cm | Taglia |
|---------------------------------------|--------|
| da 19 a 21 | 1 |
| da 21 a 23 | 2 |
| da 23 a 25 | 3 |
| da 25 a 27 | 4 |
| da 27 a 29 | 5 |

Posizionamento

1) caviglia sinistra o destra: applicare la benda elastica al tassello situato in corrispondenza del collo del piede in modo che la parte ad asola sia rivolta verso il lato interno della caviglia.

2) Tendere uniformemente la benda elastica ruotandola attorno al piede, passarla sotto la pianta del piede e sul collo del piede.

3) Avvolgere l'asola attorno al tallone e ancorarla tramite la chiusura a strappo sul tassello centrale.

Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:

- lavare a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri
- sciacquare accuratamente
- non strizzare
- lasciare asciugare orizzontalmente
- non stirare