

Cavigliera Stabigib® bivalva - Cod. 0616

E' un dispositivo medico CE

Indicazioni

Distorsioni di caviglia gravi o di media gravità

Controindicazioni

Traumi gravi per cui occorre un trattamento ortopedico o chirurgico

Caratteristiche

Stabilizzazione laterale dell'articolazione della caviglia.

Composizione

Scocca: 100% polipropilene

Talloniera: 100% poliammide

Protezione: 100% poliuretano

Cinghie: 100% poliammide

Corrispondenza taglie

Taglia	Altezza in cm
Taglia unica	26

L'ortesi può essere utilizzata sia per la caviglia destra che per la caviglia sinistra.

Posizionamento

Regolare la distanza tra le due valve, a livello del tallone, agendo sui tiranti laterali della talloniera. Applicare la valve ad entrambi i lati della caviglia in modo da coprire i malleoli. La cinghia deve essere situata all'esterno della gamba. La direzione di chiusura delle cinghie dovrà essere in senso orario per la caviglia destra e in senso antiorario per la caviglia sinistra. Se necessario, ruotare opportunamente le fibbie per orientare le cinghie verso il lato corretto. Applicare e stringere la cinghia inferiore, infilare il piede che indossa l'ortesi in una calzatura spaziosa e stabile (la scarpa deve essere regolabile con i lacci o con chiusura autoadesiva). Regolare la chiusura della scarpa. Applicare la cinghia superiore. Dopo qualche giorno di utilizzo, le cinghie possono allentarsi; in questo caso stringere di nuovo adeguatamente. Se compare un disturbo localizzato allentare le cinghie e riposizionare le valve.

Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:

- pulire le parti in plastica con un panno umido
- le protezioni laterali removibili possono essere lavate a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri
- sciacquare accuratamente
- non strizzare
- lasciare asciugare orizzontalmente
- non stirare