

Form Fit® TT - Ortesi tibio tarsica - Cod. 0625

E' un dispositivo medico CE

Indicazioni

Stabilizzazione e protezione durante l'attività sportiva.
Postumi di distorsioni.
Distorsione di caviglia di lieve gravità.

Controindicazioni

Traumi gravi che richiedono un trattamento ortopedico o chirurgico.

Caratteristiche

Ortesi stabilizzatrice dell'articolazione tibio-tarsica con rinforzi mediale e laterale.
Tessuto traforato per una maggiore areazione e leggerezza.
Pratica chiusura a lacci.

Composizione

Esterno: 100% poliestere
Interno: 100% poliestere
Rinforzi esterni: 100% polipropilene

Corrispondenza Taglie

Circonferenza sopra la caviglia in cm	Taglia
da 19 a 22	1
da 23 a 26	2
da 27 a 29	3

Posizionamento

Si consiglia, per un maggior comfort, di indossare l'ortesi sopra ad una calza.
Infilare il piede tra la linguetta nera e la scarpetta protettiva.
Calzare l'ortesi posizionando il tallone nell'apertura calcaneare.
Stringere i lacci inseriti nei primi quattro occhielli in modo da ottenere una chiusura salda ma confortevole.
Completare la chiusura incrociando i lacci sul sistema di aggancio rapido.
Adattare la linguetta e allacciare i lacci.
Utilizzare Form Fit® TT indossando una scarpa comoda.
Può capitare che dopo qualche tempo l'ortesi si allenti, in tal caso stringerla nuovamente.

Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:

- lavare a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri
- sciacquare accuratamente
- non strizzare
- lasciare asciugare orizzontalmente
- non stirare