

## Walker Equalizer® - Tutore fisso per tibio-tarsica

E' un dispositivo medico CE

### Indicazioni

- immobilizzazione a seguito di traumi o interventi chirurgici, all'articolazione tibio tarsica
- distorsione grave della caviglia
- distorsione di media gravità con interessamento della capsula anteriore dell'articolazione tibio tarsica
- traumi tendinei e muscolari
- fase di rieducazione e riabilitazione
- patologie infiammatorie o infettive che richiedono l'immobilizzazione

### Caratteristiche

- immobilizzazione dell'articolazione tibio tarsica ad angolo retto
- Plantare in schiuma ad alta densità che garantisce l'ammortizzazione del tallone
- Stivale imbottito con possibilità di inserire dei rinforzi locali per la protezione della gamba e del piede
- Suola arrotondata antiscivolo per facilitare la deambulazione
- La leggerezza dello stivale ne favorisce l'uso nei casi in cui al paziente non è consentito l'appoggio a terra del piede
- Ampia suola per consentire l'adattamento alla misura del piede
- Veloce e facile da indossare, permette la rapida dismissione in occasione dei trattamenti terapeutici

### Composizione

Base e montanti : 100% poliammide

Suola: 100% poliuretano

Cinghie: 100% poliammide

### Corrispondenza Taglie

| Misura calzatura |
|------------------|
| 37-40            |
| 40-43            |
| 43-45            |


### Posizionamento

Per le istruzioni guidate per il posizionamento, vai alla pagina successiva.

### Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:


Imbottitura: lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare. Parte rigida: pulire con una spugna umida. Asciugare con un panno.

## POSIZIONAMENTO

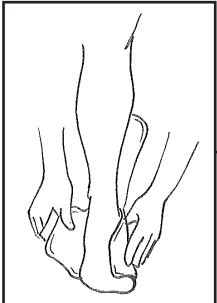




- 1.** Aprire le cinque cinghie dotate di chiusura a strappo, togliere l'imbottitura interna estraibile e calzarla intorno al piede e al polpaccio.

- 2.** Per aumentare il comfort si possono inserire, all'interno dell'imbottitura e vicino ai malleoli, i cuscinetti in dotazione.

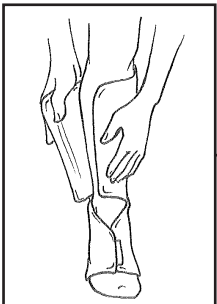

- 3.** Chiudere l'imbottitura utilizzando le chiusure a strappo.

- 4.** Introdurre il piede nello stivaletto divaricando leggermente i sostegni verticali. Il tallone deve essere spinto verso la parte posteriore in modo da risultare ben fermo. Posizionare la gamba in asse con i sostegni verticali.

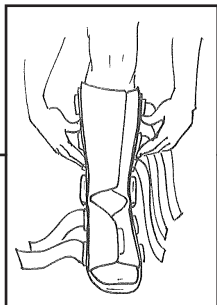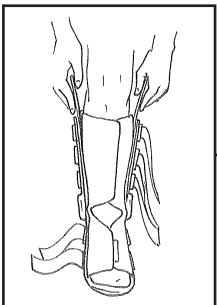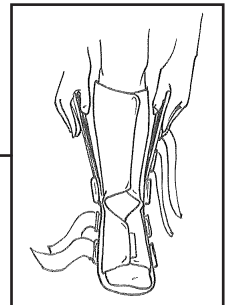

- 5.** Sfilare dai sostegni i nastri di protezione in modo da fissare l'imbottitura allo stivaletto.

- 6.** Chiudere le cinghie tibiali partendo dal basso in modo da ottenere una confortevole stabilizzazione. Successivamente chiudere le due cinghie sul dorso del piede.

